

表示プログラム等のダウンロードについて (Windows Edge 編)

診察指装着型オキシメータ
toccare

トッカーレ カタログ(日本語)
トッカーレ カタログ(英語)
トッカーレ 添付文書
データ表示プログラム(Windows) ←
セットアップマニュアル(Windows)
データ表示プログラム(Mac)
セットアップマニュアル(Mac)

①データ表示プログラムをクリック

センサープローブを指にはめ、診察者の指が触れた患者部位の酸素飽和度($rSO_2\%$)と総ヘモグロビン指数(T-HbI)を計測表示します

2019年5月、これまで新生児および成人の皮膚が測定対象でしたが、口腔内や腔(産道)内での使用が出来るよう認証の一部変更を行いました。
これにより、分娩中の産道内の胎児の頭部も測定できる様になりました。

診察指装着型オキシメータ トッカーレ

astem
Technologies for Wellness and Happiness

会社概要 製品 レポート ダウンロード レンタル お問い合わせ サイトマップ English

診察指装着型オキシメータ
toccare

トッカーレ カタログ(日本語)
トッカーレ カタログ(英語)
トッカーレ 添付文書
データ表示プログラム(Windows)
セットアップマニュアル(Windows)
データ表示プログラム(Mac)

ダウンロード
toccare_viewer
ファイルを開く

②圧縮ファイルのダウンロードが終了したら 「ファイルを開く」をクリック

センサープローブを指にはめ、診察者の指が触れた患者部位の酸素飽和度(rSO2-%)と総ヘモグロビン
指数(T-HbI)を計測表示します

2019年5月、これまで新生児および成人の皮膚が測定対象でしたが、口腔内や陰(産道)内での使用が出
来るよう認証の一部変更を行いました。

これにより、分娩中の産道内の胎児の頭部も測定できるようになりました。

診察継続型オキシメータトッカー

https://astem-jp.com/product/toccare/

SINCE 1992 **astem**
Technologies for Wellness and Happiness

会社概要 製品 レポート ダウンロード レンタル お問い合わせ サイトマップ English

ダウンロード

toccare_viewer_1_01 (1).zip
ファイルを解凍

toccare_viewer_1_01 (1).zip


すべて展開

③「すべて展開」をクリック

センサープローブを指にはめ、診察者の指が
指数(T-HbI)を計測表示します

2019年5月、これまで新生児および成人の皮
膚から測定していたT-HbIの測定精度を向上
させるよう認証の一部変更を行いました。

これにより、分娩中の産道内の胎児の頭部も測定できるようになりました。

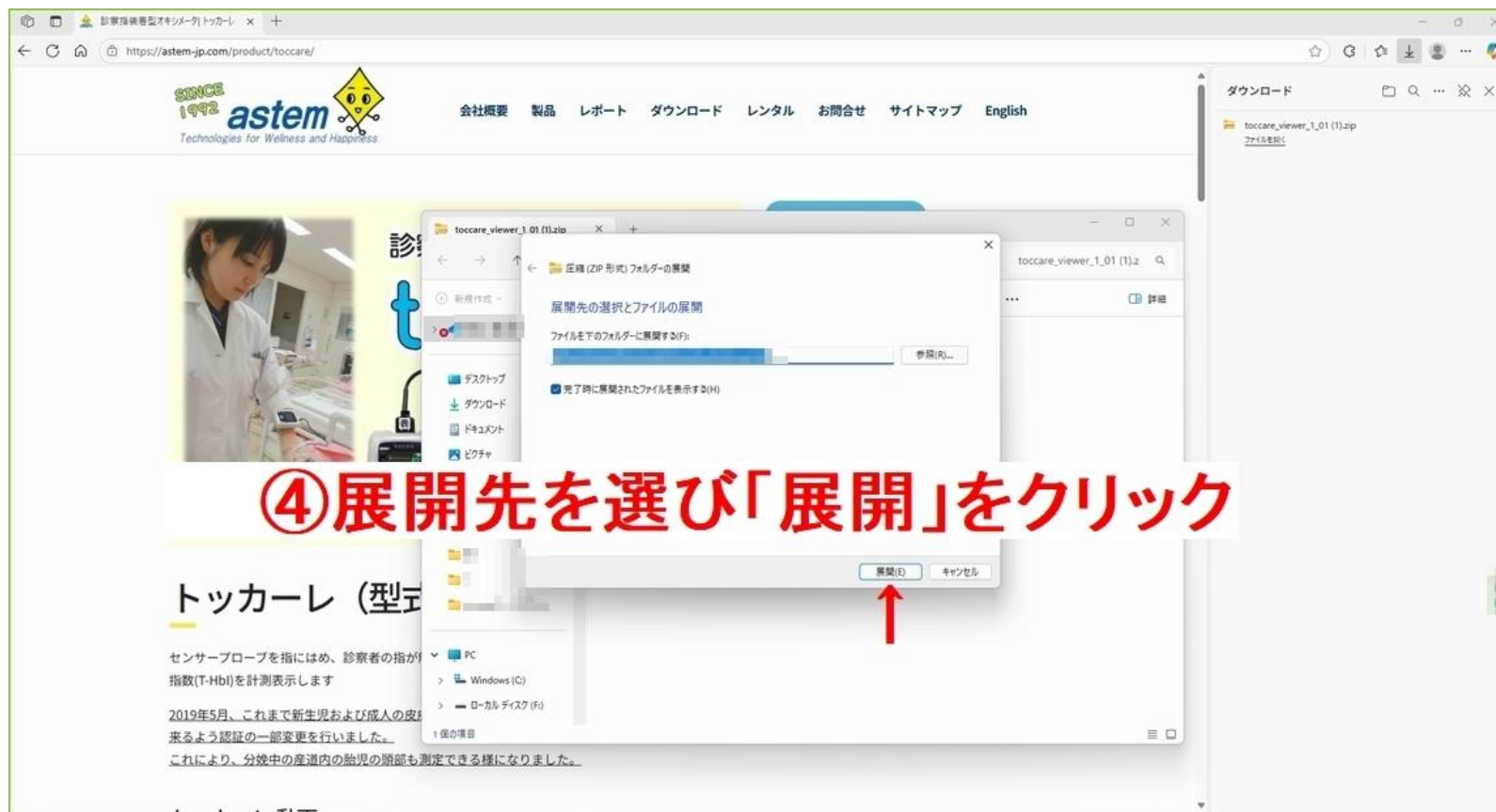

診察用胎児型オキシメータトッカーレ

https://astem-jp.com/product/toccare/

SINCE 1992 **astem**
Technologies for Wellness and Happiness

会社概要 製品 レポート ダウンロード レンタル お問い合わせ サイトマップ English

トッカーレ (型式)

センサープローブを指にはめ、診察者の指が...
指数(T-HbI)を計測表示します

2019年5月、これまで新生児および成人の皮...
来るよう認証の一部変更を行いました。

これにより、分娩中の産道内の胎児の頭部も測定

ダウンロード

toccare_viewer_1_01 (1).zip
ファイルを開く

toccare_viewer_1_01 (1)

ダウンロード > toccare_viewer_1_01 (1)

新規作成 並び替え 表示 詳細

名前	更新日時	種類	サイズ
今日			
toccare_viewer_1_01.exe	2025/06/24 15:11	アプリケーション	660 KB

⑤ダウンロード完了